



# Oxivir Sporicide Wipe

## Pesevä desinfektiopyyhe

### Kuvaus tuotteesta

Oxivir Sporicide Wipe -pyyhe on käyttövalmis, yksivaiheinen, pesevä desinfektiopyyhe, joka tehoaa mm. Clostridium difficileen sekä Bacillus subtiliseen sekä niiden itiöihin 1 minuutissa. Tuotteen vaikutus perustuu patentoituun AHP-tekniikkaan (Accelerated Hydrogen Peroxide). Tuote soveltuu vettäsietäville koville pinnoille sekä ei-invasiivisille lääkinällisille laitteille (CEIIa).

### Ominaisuudet

- Tehoaa Clostridium difficileen 1 minuutissa\*.
- Sporidinen, tuberkulosidinen, bakterisidinen, virusidinen, yeastisidinen, fungisidinen jopa 1 minuutissa\*.
- Hyvä pesuteho.
- Hajusteeton.
- Aktiivaineet hajoavat vedeksi ja hapeksi – aktiivaineita ei jää pinnoille - kerrostumaton.
- Ei sisällä klooria tai alkoholia.

\* EN-testien mukaan

### Edut

- Erinomainen enteriittien torjuntaan.
- Laajakirjoinen teho kaikkia taudinaiheuttajia vastaan.
- Lyhyet vaikutusajat. Kertakäyttöinen pyyhe - ei ristikontaminaation vaaraa.
- Ei tarvitse huuhdella pinnoilta. Käyttövalmis pyyhe - ei väärin annostelun riskiä.
- Soveltuu käytettäväksi terveydenhuollon korkean riskin kohteissa mukaan lukien teho-osastot, potilas- ja eristysuoneet.

### Käyttöohje


Poista irtolika. Avaa pyyhepakkaus, ota pakkauksesta yksi pyyhe ja sulje kansi. Pyyhi pinta ja anna kuivua. Ota uusi pyyhe, kun käytössä oleva pyyhe ei kostuta pintaa riittävästi, kun pinta on silminnähden likainen tai kun siirryt seuraavaan puhdistuskohteeseen.

**TÄRKEÄÄ:** Käytä suojakäsineitä. Älä käytä muiden kemikaalien kanssa. Älä käytä pinnoille, jotka ovat herkkiä vedelle tai hapoille.

### Annostus

Käyttövalmis

*\*Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.*

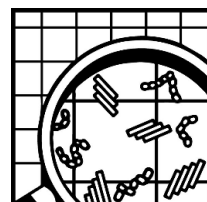

© A.I.S.E



# Oxivir Sporicide Wipe

## Tekniset tiedot

pH-arvo (laimentamaton): ~ 3  
pH-arvo (käyttöliuos): ~ 3  
Suhteellinen tiheys (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 1.03

*Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaaliuotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjeavoina.*

## Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelymiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

## Yhteensopivuus

Oxivir Sporicide Wipe -pyyhkeet soveltuvat käytettäväksi useimmille käytössä oleville materiaaleille suositelluissa käyttöolosuhteissa.

**Säilyvyys:** Säilyy avaamattomana 2 vuotta, avattuna 28 vrk.

**Huomioitavaa:** Käytä suojakäsineitä! Ei saa käyttää marmoripinnoille. Älä sekoita toisten tuotteiden kanssa. .

## Mikrobiologiset tiedot

Teho viruksiin, bakteereihin, itiöihin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti. Tuotteella on CE IIa -sertifiointi. Pyydä tarvittaessa testitulokset edustajaltamme.

**[www.diversey.com](https://www.diversey.com)**

© 2021 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 01/12/2021 fi-FI (K00239)